

飛沫抑制用フェイスシールド

MIZUNO FACE SHIELD



スポーツ用顔面保護プロテクターでも使用されている額パッド素材

ズレにくい伸縮性ストラップ

仕様

額パッド / EVA、PE
シールド / PET (耐熱温度: 55°C)
ストラップ / TPE

質量 / 約 63g

用途

液体などが眼または顔に侵入するのを抑制します。
※本品は感染(侵入)を防ぐものではありません。

装着方法

- ①シールド両面の保護シートを剥がします。
- ②額にパッドが当たるよう位置を合わせ、ストラップを頭に通します。
- ③ストラップ留め部品を締め付け、しっかり固定します。

取扱い上の注意

ご使用前に必ず取扱い上の注意をご精読し、使用期間中はこの取扱い上の注意を大切に保管して下さい。
この取扱い上の注意は当フェイスシールド使用者以外が取り除いてはなりません。
本製品に破損が生じないこと及び本製品の使用によって眼、身体の損傷の可能性がなくなることを保証するものではありません。

1. 本製品使用前のご注意

- ・輸送途上等に製品にキズや変形が生じる恐れがあります。
ご使用の際は必ず事前に点検をして下さい。
 - ①使用用途に記載している以外の目的には使用しないで下さい。
 - ②大きな飛来物やエネルギーの強い飛来物が発生する現場では使用しないで下さい。
 - ③作業中にフェイスシールドを外さないで下さい。
 - ④製品に不具合が発生した際は速やかに廃棄して下さい。

2. 本製品着用の留意点

- ・使用する前に絶えず本体のキズ、変形、シールドのキズ、透明度の点検をして下さい。
- ・シールドがしっかりと額パッドに固定されているか点検をして下さい。
- ・火のそばでのご使用はおやめ下さい。
- ・シールドが曇る場合がありますので、作業の際などは十分にご注意下さい。
- ・肌や身体に異常を感じた際は、ご使用をおやめ下さい。

3. 保守・管理

- ・シールドにキズや汚れがあると、視界を妨げたり、眼の疲労の原因になり危険です。
シールドがキズつかないように他の物体に直接接触させないで下さい。
- ・長い期間使用しているとシールドの透明度が低下します。使用毎に点検して下さい。
- ・乳幼児の手の届かない場所に保管して下さい。
- ・汚れを拭き取る際はアルコールを含ませた布でやさしく拭き取って下さい。
- ・熱湯や、アルコール以外の薬品での掃除・消毒はおやめ下さい。
- ・本製品は繰り返しの使用を想定されたものではありません。

4. 改造・修理など

ご使用者による改造・修理は事故の原因となり危険ですので、行わないで下さい。



これらはミズノ株式会社のブランドロゴです。

ミズノ株式会社

「ミズノお客様相談センター」(7/11-24)0120-320-799
〒101-8477 東京都千代田区神田小川町3-22
〒559-8510 大阪市住之江区南港北1-12-35